

# Tiszta képet biztosítunk Önnek cukorbetegségének megértéséhez



## Minden adatot vegyen figyelembe

A diabétesz hatékony kezelésében valamennyi vércukorérték fontos információval bír. Ezért fontos a rendszeres vércukor-önellenőrzés. Ön tiszta képet kaphat anyagcsere állapotáról, és kezelőorvosa időben meghozhatja a szükségeses terápiás módosításokat.

Az Accu-Check Smart Pix leolvasó készülék/program segítségével a vércukormérő készülék vagy az inzulinpumpa adatai könnyen és gyorsan megjeleníthetők számítógépén.

**FIGYELEM:** egyes Accu-Chek eszközök adatletöltéséhez külön Accu-Check Smart Pix leolvasó készülékre van szükség (pl. Accu-Check Performa és Accu-Check Performa Combo vércukormérők, illetve Accu-Check Spirit Combo inzulinpumpa).  
Vannak olyan vércukormérők is (pl. Accu-Check Active és Accu-Check Instant), amely adatletöltéséhez csupán az Accu-Check Smart Pix programra van szükség és USB csatlakozón keresztül csatlakoztathatók a számítógéphez. Az Accu-Check Smart Pix program ingyenesen letölthető a [www.vercukormeres.hu](http://www.vercukormeres.hu) oldalról.

## Egyszerű megoldás a diabétesz hatékony gondozása érdekében



**Dugja be** az Accu-Check Smart Pix leolvasó csatlakozóját a számítógép USB portjába. Az Accu-Check Smart Pix software települni fog a számítógépére. Kövesse a megjelenő utasításokat!




### **Könnyű kezelhetőség:**

Az Accu-Check Performa és Accu-Check Performa Combo vércukormérő készülékek vagy az Accu-Check Spirit Combo inzulinpumpa adatai egyszerűen és gyorsan, infravörös kapcsolaton keresztül megjeleníthetők számítógépén. **Helyezze** a készüléket az Accu-Check Smart Pix infravörös érzékelőjétől 3–10 cm-re.



### **Egyszerűbb, mint gondolná:**

Az Accu-Check Active és Accu-Check Instant vércukormérők adatátviteléhez nincs szükség Accu-Check Smart Pix leolvasó készülékre, azoknál az adatletöltés közvetlen USB csatlakozáson keresztül végezhető el az ingyenesen letölthető Accu-Check Smart Pix program segítségével.

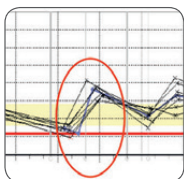

### **Hatékony segítség:**

Az Accu-Check Smart Pix a cukorbetegséggel kapcsolatos adatokat képként, könnyen kiértékelhető grafikonok formájában jeleníti meg. **Indítsa el** az Accu-Check Smart Pix programot és kattintson az "Adatok beolvasása" gombra! Ezt követően az eredmények láthatók lesznek a képernyőn.

## Kapjon tiszta képet cukoranyagcseréjéről


Az Accu-Chek Smart Pix program azonnal letölti az adatokat könnyen használható formátumba. A vércukor- és inzulinszintek az Ön tetszése szerint többféle formátumban kerülnek megjelenítésre (15 különféle megjelenítési mód), ezáltal az értékek ingadozásai és trendjei könnyen áttekinthetőek lesznek.

### Vegye észre a kritikus pontot az értékei között!

Az alábbi grafikonon hirtelen vércukorszint emelkedés látható. Vajon mi okozta? Az Accu-Chek Smart Pix segítségével kezelőorvosa azonnal megteheti a szükséges intézkedéseket.

### Az Accu-Chek Smart Pix leolvasó készülék rendszerkövetelményei:

- Számítógép vagy laptop egy szabad USB porttal
- Windows XP vagy annál újabb operációs rendszer
- Minimálisan 1024×768 pixel felbontású monitor
- Nyomtató (amennyiben a kapott grafikont ki akarja nyomtatni)

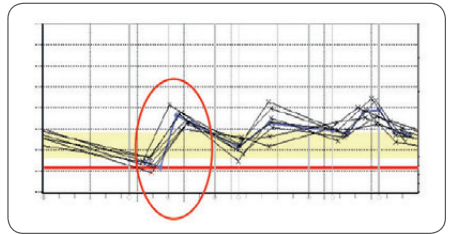

## Tegye minden eddiginél könnyebbé cukorbetegségének megértését

A cukorbetegség gondozását az alábbi módon könnyítheti meg:

- Vércukoradatai könnyebben értékelhetők.
- Segítségével gyorsan felismeri a kóros trendeket, meg tudja azokat jelölni, és felfedezheti a kockázati tényezőket.
- Tiszta képet nyújt kezelőorvosa számára, így a kezelés az Ön igényeire szabható.
- Segít a vércukorértékek ellenőrzésében, így lehetőség van a rövid- és hosszútávú szövődmények kockázatát csökkenteni.



# Accu-Chek Smart Pix – hatékonyabb cukorbeteg-gondozás, egyszerűen

- Egyszerű és informatív grafikonok a vércukormérő és az inzulinpumpa adatairól
- A releváns információk tiszta áttekinthetősége segít a kezelés egyéni igényekhez történő igazításában
- Kompatibilis valamennyi Accu-Chek vércukormérővel és inzulinpumpával



**Bővebb információ: [www.vercukormeres.hu](http://www.vercukormeres.hu)**

**[www.rochepumpa.hu](http://www.rochepumpa.hu)**

**06 (80) 200-694**

(ingyenesen hívható zöldszám)



Roche Magyarország Kft.  
2040 Budaörs, Edison u. 1.

**ACCU-CHEK®**

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!